

MANUAL DO SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO

Higienização das ventosas e pinças

FEVEREIRO DE 2020



DURANTE TODA ESTA ETAPA DESLIGUE O EQUIPAMENTO E RETIRE TODOS OS CABOS

1 – Materiais necessários:

- Papel toalha.
- Álcool Isopropílico ou Bactericida.
- Detergente neutro.

2 – Higienização rápida entre exames:

- Remova os cabos com cuidado, pressionando a ventosa uma a uma.



- Remova as pinças.



- Com papel toalha umedecida em Álcool, retire o excesso de gel no cabo, pinças e ventosas.

3 – Higienização no fim do expediente:

- Execute os mesmos procedimentos da higienização rápida entre pacientes.
- Desmonte as ventosas girando para não danificar as borrachhas.



- Lave com detergente neutro e água limpando bem as cavidades.



- Lave com detergente neutro e água as pinças.



- Com papel toalha, seque bem, principalmente os pontos de contato.




CERTIFIQUE-SE DE QUE TUDO ESTEJA BEM SECO PARA QUE NÃO ENFERRUGE

4 – Higienização caso as ventosas ou pinças estejam enferrujadas ou oxidadas:

- Desmonte as ventosas girando para não danificar as borrachhas.



- Efetue a limpeza das ventosas (exceto as borrachhas) ou pinças com uma solução de bicarbonato de sódio e vinagre de álcool para remoção da ferrugem ou oxidação.

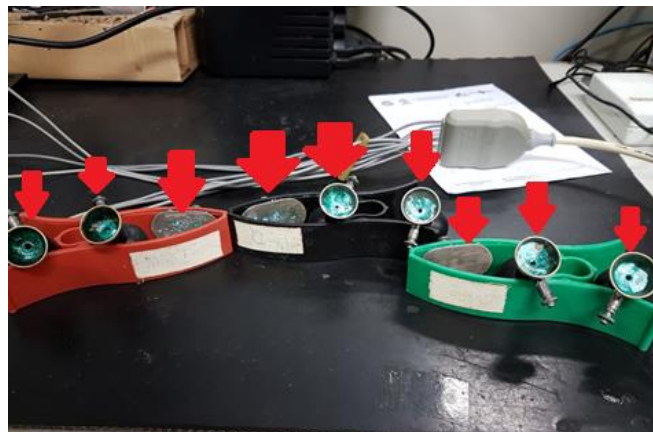

- Lave com detergente neutro e água limpando bem as cavidades.



- Lave com detergente neutro e água as pinças.



- Com papel toalha, seque bem, principalmente os pontos de contato.

